

Modular Brailletastatur

Ideal zum Schreiben in Punktschrift am PC



Die Modular Evolution Brailletastatur ist eine vollwertige Computertastatur für die Eingabe von Braille und für die Eingabe von Punktschrift. Sie kann alle Eingabemöglichkeiten einer MF2-Tastatur realisieren. Einfach per USB an den PC anschließen und schon los geht es. Die Brailleeingabetasten befinden sich zentral in dem Bereich, in dem sich bei einer Standard-MF2-Tastatur die Buchstabentasten befinden. Sie sind ergonomisch angeordnet und entsprechen den Braille-Punkten <P1 bis P8>. Durch Drücken einer Tastenkombination wird jeweils ein Zeichen eingegeben.

- Punktschriftastatur - ideal für die Eingabe von Braille und für die Steuerung des PC
- 8 ergonomisch angeordnete Brailleeingabe-Tasten
- Eingabe von Vollschrift möglich
- Steuerungs- und Funktionstasten
- abgestimmte Leertasten für Screenreadersteuerung
- Nummernblock
- per USB anschließbar
- ideal mit der Modular Evolution 88/64 kombinierbar - keine zusätzliche Kabelverbindung nötig

Alle Steuer- und Funktionstasten verfügbar

Die kompletten Steuertasten und sogar alle Tasten des numerischen Tastenblocks einer Standard-PC-Tastatur sind auf der Modular Evolution Brailletastatur vorhanden.

Screenreadersteuerung

Die beiden Leertasten sind speziell auf die Bedürfnisse von Screenreader-Nutzern, wie z.B. von JAWS für Windows, abgestimmt und haben folgende Funktionen:

- Wird eine der beiden Leertasten oder beide Leertasten ohne eine weitere Brailletaste (P1 bis P8) gedrückt, wird die Funktion einer Leertaste ausgeführt.
- Wird eine Leertaste zusammen mit Brailletasten (P1 bis P8) gedrückt, führt die linke Leertaste die Funktion der Einfügetaste und die rechte Leertaste die Funktion der Strg-Taste aus.
- Werden die beiden Leertasten zusammen mit Brailletasten gedrückt wird die Einfügetaste, die Strg-Taste und die Braillekombination ausgeführt.



Vollschrifteingabe

Über einen zweiten Braillezeichensatz können Sie mit der Modular Evolution Brailletastatur Vollschrift eingeben, die dann direkt als Volltext ausgegeben wird. Gibt man z.B. ein sch-Zeichen als Punkte 156 ein, wird in den Text die Buchstabenfolge „sch“ eingefügt.

Kombination mit der Modular Evolution 88/64

Die Modular Evolution Brailletastatur ist an die Modular Evolution 88 und 64 ohne zusätzliche Kabelverbindung anclickbar.



Technische Daten

- 8 Brailletasten (P1 –P8)
- 2 Leertasten
- Funktionstasten F1– F12, Escape-Taste, Num-Lock, ScrLog, Print, Strg-, Shift-, Alt-, Windows-Tasten
- 6er Block, Cursortasten
- Nummernblock 17 Tasten
- Maße: 25,0 x 4,5 x 16,5
- Gewicht: 1,0 kg

Ihre Ansprechpartner:

Stuttgart: 0711 2202299-0
Köln: 0221 921556-0
Marburg: 06421 690012-0
Hamburg: 040 87963121-0
Lüneburg: 04131 699698-0