


Basic Braille

Die komfortabel bedienbare und preiswerte Braillezeile

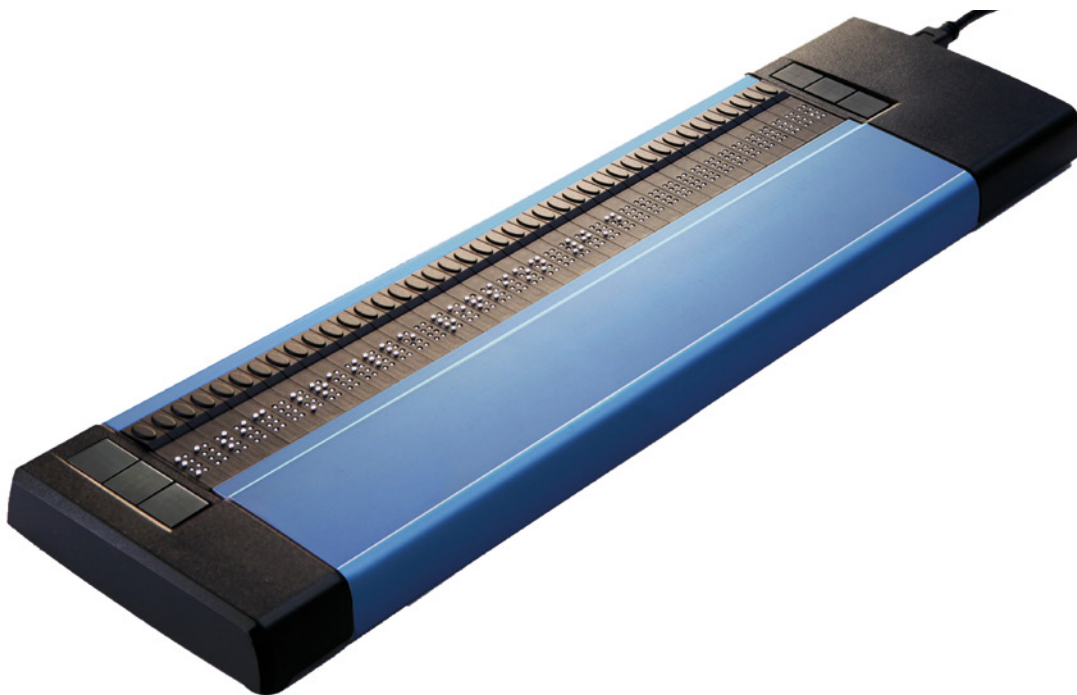

Die mobile Braillezeile Basic Braille ist standardmäßig mit 40 Brailleelementen ausgestattet. Wahlweise ist sie auch mit 32, 64 oder 80 Brailleelementen erhältlich. Mit der Basic Braille erhalten Sie ein preiswertes Einstiegsmodell in die Handy Tech Braillezeilen-Serie von Help Tech, in hoher Qualität „Made in Germany“. Das Gehäuse der Basic Braille besteht aus robustem Aluminium. Die Seitenteile sind aus einem hochwertigen, strukturierten, angenehm griffigen Kunststoff gefertigt. Ausgestattet mit langlebigen Brailleelementen mit besonders abriebfesten Taststiften wird Ihnen die Basic Braille für viele Jahre den Zugang zu Computersystemen ermöglichen.

- mit 32, 40, 64 oder 80 Brailleelementen mit Cursorrouting erhältlich
- schickes, robustes Aluminium-Gehäuse sowie langlebige Brailleelemente
- integrierter Lithium-Ionen Akku ermöglicht eine kabellose Nutzung (Bluetooth-Variante)
- flaches und platzsparendes Design
- HID-Technologie: ist ohne die Installation von Programmen sofort einsatzbereit
- optional mit Bluetooth erhältlich: ermöglicht den Einsatz zu mobilen Geräten wie Notebooks

Flexibel einsetzbar

Die Basic Braille ist zur optimalen Nutzung mit einem Laptop-Computer standardmäßig mit 40 Brailleelementen ausgestattet. Die Variante mit 64 Brailleelementen ist ideal für die Kombination mit einer PC-Tastatur. Durch die sehr flache Bauform kann die Basic Braille vor einer Tastatur oder einem Laptop platziert werden.

Leicht zu bedienen

Mit den jeweils nur 3 Tasten links und rechts der Brailleelemente kann die Basic Braille sehr einfach bedient werden. Navigieren Sie mit einer Hand durch Texte, während Sie mit der anderen Hand auf der Braillezeile lesen. Mit den in die Brailleelemente integrierten Cursorrouting-Tasten können Sie die Schreibmarke, also den Cursor, an der gewünschten Textposition platzieren und dort den Text bearbeiten.

Universeller Zugang

Die Basic Braille arbeitet mit allen gängigen Bildschirmausleseprogrammen - ob mit JAWS, SuperNova, NVDA oder VoiceOver für Apple Computer. Diese sogenannten Screenreader ermöglichen blinden Nutzern den Zugang zu Computersystemen mit einer Braillezeile häufig in Kombination mit Sprachausgabe. Angeschlossen per USB an einen PC benötigt die Basic Braille keine separate Stromversorgung.

Durch die HID-Technologie (Human Interface Device) ist die Basic Braille sofort einsetzbar, ohne lästige Installation von Programmen. Die Basic Braille wird beim Einstecken an einen Computer per USB dank HID vom System automatisch erkannt.

Optional mit Bluetooth

Die Bluetooth-Variante der Basic Braille ermöglicht zusätzlich den Zugang zu mobilen Geräten wie Smartphones, Tablet PCs und iPhones. Die Basic Braille mit Bluetooth ist mit einem leistungsstarken internen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der über die USB-Schnittstelle aufgeladen wird. Das Laden des Akkus ist auch über ein Standard-Handy-Netzteil mit Micro-USB-Anschluss oder den mitgelieferten Ladestecker über die Steckdose möglich.

Technische Daten

- 32 / 40 / 64 / 80 Brailleelemente mit Cursorrouting
- 6 geräuscharme Tasten, je 3 Tasten rechts und links
- Mikro USB Schnittstelle
- Netzunabhängig (Spannungsversorgung über USB)
- Maße (B x H x T) / Gewicht:
 - 40er: 34,7 x 9,15 x 1,95 cm
 - Gewicht: 680 g, 730 g (mit Akku)
 - 64er: 50,1 x 9,15 x 1,95 cm
 - Gewicht: 920 g, 1120 g (mit Akku)
 - 80er: 60,3 x 9,15 x 1,95 cm
 - Gewicht: 1120 g, 1320 g (mit Akku)

Bluetooth Version: Akku

- Laufzeit: bis zu 12 Std.
- Ladezeit: 3 Std.

Ihre Ansprechpartner:

Stuttgart: 0711 2202299-0
Köln: 0221 921556-0
Marburg: 06421 690012-0
Hamburg: 040 87963121-0
Lüneburg: 04131 699698-0